

**TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT
NOW! PRO SUPPLIES OD GREEN**

Överlevnadsutrustning > Första Hjälpen > Första Hjälpen

Trauma Kit NOW! – MEDIUM är ett MOLLE-monterat medicinskt kit som kan användas på sekunder. Denna första hjälpen-väska var ursprungligen designad för att rymma innehållet i Army IFAK och andra medicinska förnödenheter. Detta medicinska kit monteras på en 3x3 MOLLE-fält, ett stridsbälte eller andra MOLLE-kompatibla ytor med det patenterade BFG Helium Whisper Attachment System. Helium Whisper Attachment System är det lättaste MOLLE-fästsystemet som finns. Det har mindre volym så att det sitter närmare kroppsskyddet, ryggsäcken eller bältesystemet. Det har färre delar som kan gå sönder och är metallfritt för att minska sekundär fragmentering. Bäst av allt, Helium Whisper erbjuder en total viktbesparing på upp till 40% jämfört med traditionella väskor.

PRO FÖRSEDDER INNEHÅLLER: Trauma Handskar (Rullad 1x Par) Quikclot Blödningskontroll Förband (1x) Nödsituation Trauma Förband 6" (1x) Hypotermiblandning - Grön / Silver (1x) Platt Vikband (1x) Trauma Sax (1x) Fullstor Brösthörseglung (1x Tvillingpaket)



Produktinformation

- Namn: BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES OD GREEN
- Tillverkare: BLUE FORCE GEAR
- Produktnr: 430100750
- Tillv.nr.: HW-TKN-MED-PRO-
- Storlek: 1 Person
- Leveransvikt: 0.492kg
- Leveranshöjd: 83mm
- Leveransbredd: 133mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 810073650282

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES

Introduktion

Tack för att du har valt TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES. Detta medicinska kit är designat för att ge snabb och effektiv första hjälpen i nödsituationer. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kitet enligt instruktionerna för att minimera riskerna.
- Håll kitet utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra oavsiktlig användning.
- Kontrollera regelbundet att alla komponenter i kitet är intakta och inom utgångsdatum.
- Rapportera eventuella skador eller brister i kitet till tillverkaren eller återförsäljaren.
- Vid osäkerhet om hur man använder något av innehållet, sök professionell medicinsk hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Trauma Handskar:
 - Använd alltid handskar för att skydda både dig själv och den skadade.
- Quikclot Blödningskontroll Förband:
 - Använd endast på öppna sår som blöder kraftigt.
- Nödsituation Trauma Förband:
 - Applicera på stora sår eller skador där blödning är ett problem.
- Trauma Sax:
 - Var försiktig när du använder saxen för att undvika skador.
- Fullstor Brösthörseglings:
 - Kontrollera att förseglingen är korrekt applicerad för att förhindra luftläckage.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera innehållet:**
 - Öppna kitet och kontrollera att alla komponenter är närvarande och i gott skick.
2. **Användning av Trauma Handskar:**
 - Ta på dig handskarna innan du hanterar någon skada.
3. **Applicering av Quikclot Blödningskontroll Förband:**
 - Placera förbandet direkt på såret och tryck för att stoppa blödningen.
4. **Användning av Nödsituation Trauma Förband:**
 - Rulla ut förbandet och placera det över såret, fäst ordentligt.
5. **Användning av Trauma Sax:**
 - Använd saxen för att klippa bort kläder eller andra hinder runt såret.
6. **Applicering av Fullstor Brösthörseglings:**
 - Fäst förseglingen över skadan och tryck ned ordentligt för att säkerställa tätning.

Avfallshantering

- Kassera använda handskar och förband i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Försäkra dig om att inga vassa eller farliga föremål lämnas kvar i kitet efter användning.
- Håll alltid kitet rent och i gott skick för att säkerställa dess effektivitet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om produkten eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se alltid till att ha produktens serienummer och inköpsdatum till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se